

POLIDENTAL MULTIVEST F

LÍQUIDO UNIVERSAL DE ALTA EXPANSÃO PARA REVESTIMENTOS FOSFATADOS


- Desenvolvido para ser utilizado com todos os tipos de revestimentos fosfatados POLIDENTAL, sendo especialmente útil em casos de falta de líquido e sobra de pó no laboratório.

- Proporciona um aumento real de até 50% na expansão total do revestimento, conforme gráfico abaixo.

IMPORTANTE: Consultar tabela de diluição, para adaptar o seu MULTIVEST F à sua técnica.



Não considerado produto para saúde conforme resolução RDC Nº260/02.

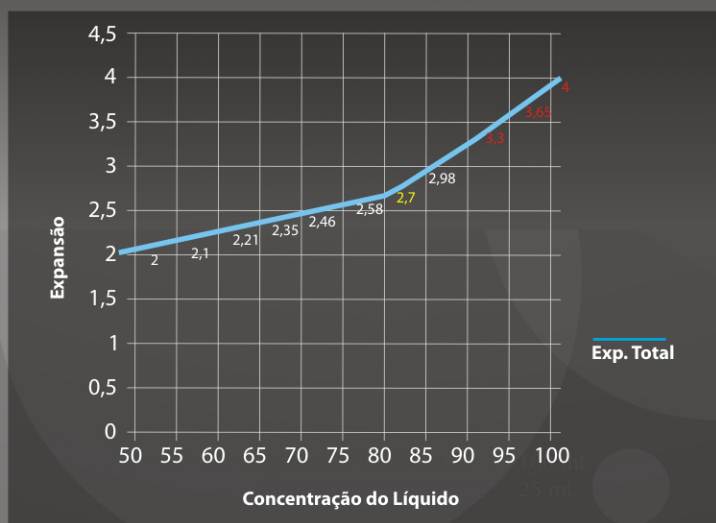

Não recomendado o uso do líquido puro para a técnica de choque térmico.

Concentração (%)	Exp. Total	Líquido(mL)	Água(mL)
50	2	50	50
55	2,1	55	45
60	2,21	60	40
65	2,35	65	35
70	2,46	70	30
75	2,58	75	25
80	2,7	80	20
85	2,98	85	15
90	3,3	90	10
95	3,65	95	5
100	4	100	0

■ Concentração equivalente ao líquido Heat Shock

■ A partir destas concentrações não se deve fazer processo de choque térmico para evitar explosões no anel.

Atendimento ao Cliente:

Capital e Grande SP: (11) 4613.6133

Demais Regiões: 0800.14.2999



Você pode confiar.

www.polidental.com.br